

VITALITY

walking cane tailormade



walking cane tailormade



Deze handleiding biedt stap-voor-stap de instructies voor het op maat brengen van de VITALITY Wandelstok - tailormade. Je kunt dit document raadplegen op www.vitality.com/gr/wctm.

Heb je vragen of opmerkingen,
of wil je een onderdeel van de montagekit bestellen?
Neem dan contact met ons op via info@vitality.com of
bel naar [013 544 61 24](tel:0135446124).



Benodigdheden

Walkingcane - tailormade:

- Buis
- Handvat
- Dop
- CE/Fabriekssticker

Montage kit:

- Buizensnijder
- Borglijm

Gereedschap en benodigdheden

- Meet instrument (rolmaat/meetlint)
- Potlood (of iets anders waarmee je kunt aftekenen)
- Microvezeldoekje
- eventueel Reinigingsmiddel (allesreiniger)

1. Schoenen

Vraag aan de klant:

"Heeft u uw meest gedragen schoenen aan?"

- **Ja:** Ga door naar **stap 2**.
- **Nee:** Vraag of er veel hoogteverschil zit tussen de zool van de huidige schoen en de meest gedragen schoen.
 - **Ja:** Houd bij het verrichten van de meting rekening met de schoenzool van de klant. De wandelstok wordt aangemeten op de momenteel gedragen schoen. Draagt de klant vaak schoenen met een andere zoolhoogte? Wijs de klant hier dan op.
Ga door naar stap 2
 - **Nee:** Ga door naar stap 2.

2. Houding voor het meten:

Laat de klant rechtop staan, in ontspannen houding (zie afbeelding 1).

- Voeten naast elkaar op schouderbreedte.



Afbeelding 1

3. Meten polsknobbels

Meet de polsknobbels vanaf de grond met behulp van een meetlat/meetlint.

De ideale hoogte voor de wandelstok is bovenkant pols (zie afbeelding 2).



Afbeelding 2

Tips/Advies:

- Als de klant de wandelstok langer wil, kan dat, maar dit wordt afgeraden. Een te korte stok kan leiden tot scheef lopen, wat op den duur klachten kan veroorzaken aan de rug en schouders.

4. Voer de hoogte in

Scan de QR-code of ga naar
<https://vitality.com/gr/wctm>

Vul daar de gemeten hoogte in om te bepalen op welk formaat de buis ingekort dient te worden. (afbeelding 3)



Afbeelding 3

5. Verpakking openen

Open de verpakking van de Walkingcane - tailormade en haal de buis, het handvat, de sticker en de rubberen dop uit de doos. Leg klaar op een bureau (zie afbeelding 4)



Afbeelding 4

6. Voorbereiding voor montage

- Pak de borglijm uit de montage kit.
- Breng 2 druppels borglijm op het schroefdraad aan de binnenkant van de buis aan. Zorg dat er niet te veel gebruikt wordt, dit kan op het handvat of buitenkant van de buis komen. (zie afbeelding 5)



Afbeelding 5

7. Monteer eerst het handvat

- Draai het handvat van de wandelstok vast op de buis (let op: de zijde met het schroefdraad moet in de buis worden gedraaid).
- Draai handvat stevig aan. (zie afbeelding 6)
- Zorg dat na het vast draaien van het handvat de lijm voldoende tijd krijgt om uit te harden (ca. 12 uur).
- Geef advies dat er na het monteren niet meer gedraaid wordt aan de buis of handvat.



Afbeelding 6

8. Teken de berekende hoogte

Gebruik de uitkomst van de website om de afgemeten hoogte op de buis te markeren (gemeten vanaf de onderzijde van de buis, de kant met het CE-logo en de fabrieksgegevens). (Zie afbeelding 7).



Afbeelding 7

9. Buis snijden

Gebruik de buizensnijder om de buis door te snijden op de gemarkeerde locatie. Zet het mesje op de markering en draai klem en draai de snijder om de buis heen om steeds dieper door te snijden. (zie afbeelding 8)

- Draai twee korte slagen en draai vervolgens de snijder geheel rond.
- Herhaal tot de buis volledig is doorgesneden.

Tips/Advies:

- Draai het mes van de pijpsnijder niet te strak. Hierdoor kun je de buis van de wandelstok verbuigen of het mes beschadigen.



Afbeelding 8

10. Verwijder bramen

Verwijder de scherpe bramen aan de binnenzijde van de buis eenvoudig met de meegeleverde afbramer in de pijpsnijder.


Schuif de afbramer uit de pijpsnijder, positioneer aan de binnenzijde van de buis en draai een paar rondjes terwijl je deze naar buiten toe duwt. Hierdoor laten de bramen eenvoudig los.



Afbeelding 9

11. Plak de CE/fabrieksticker

Plak de sticker aan de onderzijde binnenkantbuis van de wandelstok (zie afbeelding 10 t/m 13).

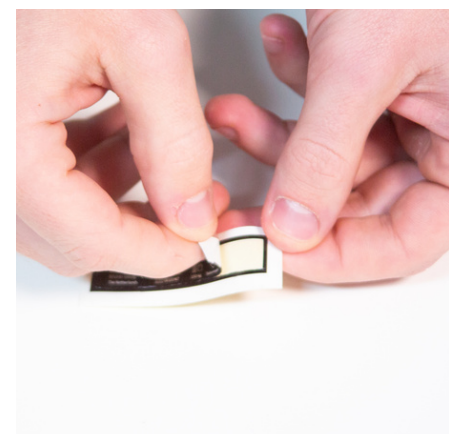

Afbeelding 10



Afbeelding 11



Afbeelding 12



Afbeelding 13

12. Plaats de rubberen dop

Plaats de rubberen dop aan de wandelstok. Let op dat het Vitality-logo naar het korte uiteinde van het handvat wijst (voorzijde wandelstok). (zie afbeelding 14 en 15)



Afbeelding 14

13. Aanduwen dop

Zet de wandelstok op de grond en duw de dop stevig aan om zeker te zijn dat deze goed bevestigd is aan de wandelstok. (zie afbeelding 16)



Afbeelding 15



Afbeelding 16

14. Schoonmaken

Maak de wandelstok schoon met een microvezel doek zodat eventuele vinger vlekken verwijderd worden. (zie afbeelding 17)



Afbeelding 17

15. Overhandig de stok

Overhandig de stok aan de klant en vraag bevestiging voor de hoogte. (zie afbeelding 18)



Afbeelding 18